


01.

AXIALE ATTACHMENTS

PRECI-BALL
DEUTSCH

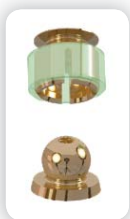

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

PRECI-BALL

EIN ATTACHMENT MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN

- 1** **Löten** Sie die Patrize auf die Stiftwurzelkappe.
So kombinieren Sie höchste Präzision und genaue Verarbeitung zu einem äußerst geringen Preis.



- 2** **Gießen** Sie die Patrize an eine Edelmetalllegierung an oder komplettieren Sie mit dem Basisring und einer ausschraubbaren Patrize. Diese Technik garantiert Ihnen eine ideale Kombination aus Präzision und einfacher Nachsorge.



- 3** **Gießen** Sie die Patrize in einer harten Dentallegierung. Dieses ist die preiswerteste Lösung. Zum Ausarbeiten der Patrize verwenden Sie den PRECI-BALL-Hohlfräser.



Entlasten Sie die Stiftwurzelkappe mit der mitgelieferten Zinnfolienscheibe.
RA 0055

PRECI-BALL OR/OR

1201



H: 3,5 mm

Matrize in ORAX, zur Verankerung in Kunststoff
1201 A 1 Matrize
1201 AB 20 Matrizen



Patrize in ORAX, zum Löten auf die
Stiftwurzelkappe



1201 C 1 Patrize

PRECI-BALL PC

1205



H: 3,5 mm

Matrize in TITANAX, zur Verarbeitung in Kunststoff
1205 A 1 Matrize
1205 AB 20 Matrizen



Patrize aus ausbrennbarem Kunststoff,
zum Mitgießen mit der Stiftwurzelkappe



1205 C 1 Patrize

1205 CB 50 Patrizen

PRECI-BALL CV

1206



H: 4,3 mm

Matrize in ORAX, zur Verarbeitung in Kunststoff
1201 A 1 Matrize
1201 AB 20 Matrizen



Patrize in TITANAX, zum Einschrauben
in den Basisring



1206 C 1 Patrize

Basisring in IRAX, zum Angießen an
Edelmetall- und Palladiumbasislegierungen



RA 0063 1 Basisring

PRECI-BALL OR/IR

1209



H: 3,5 mm

Matrize in ORAX, zur Verarbeitung in Kunststoff
1201 A 1 Matrize
1201 AB 20 Matrizen



Patrize in IRAX, zum Angießen an
Edelmetalllegierungen



1209 C 1 Patrize

**AKTIVIERHILFSTEIL**
1220

1 Stück

**DESAKTIVIERHILFSTEIL**
1221

1 Stück

**SCHRAUBENZIEHER FÜR DIE PATRIZE
MIT GEWINDE**
IMP-XS-042

1 Stück

**PARALLELHALTER FÜR DIE PATRIZE**
1201 P

1 Stück

**PARALLELHALTER FÜR DIE MATRIZE**
1211 P

1 Stück

**PARALLELHALTER FÜR DEN BASISRING**
RE P 4

1 Stück

**HOHLFRÄSER**
1230

2 Stück

Fräser zum Ausarbeiten der Patrize 1205 C

**MODELLANALOG**
1201 D

2 Stück

**PATRIZE V EXTRA LANG**
1206 CL

1 Stück

Spezielle Titanpatrize mit 0,3 mm
längerem Gewinde**CEKA BOND**
CB1

5 ml

Anaerob aushärtendes Sicherungsmittel
zum Verhindern der ungewollten Lockerung
von Prothesenteilen

PRECI-BALL

EIN VIELSEITIGES ATTACHMENT

2,25 mm
Kugeldurchmesser



Dank des Kugeldurchmessers von 2,25 mm ist PRECI-BALL mit fast allen Implantatsystemen kompatibel.



Verwenden Sie hierzu einen kugelförmigen Pfeiler des jeweiligen Anbieters.



Die PRECI-BALL-Matrize ist auch in einer vorteilhaften Großpackung von 20 Stück erhältlich.



Das PRECI-BALL-System ist kompatibel mit PRECI-CLIX (siehe PRECI-CLIX-Prospekt) und kann daher beliebig kombiniert werden.

LEGIERUNGSTABELLE

ORAX - Gelb - Au 70 - Pt 5 - Ag 12 - Cu 13

Schmelzintervall: 910-955 °C

TITANAX - Weiß - Ti 90 - Al 6 - V 4 (Nicht erhitzen!)

IRAX - Weiß - Au 60 - Pt 24 - Pd 15 - Ir 1

Schmelzintervall: 1400-1460 °C

CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADIKULÄR
PRECI-BALL

01.
AXIALE
ATTACHMENTS

CEKA EXTRAKORONAL
CEKA ID
PRECI-VERTIX
PRECI-VERTIX AT
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52
PRECI-TUBIX/MORTIX

02.
EXTRAKORONALE
ATTACHMENTS

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

03.
PROFIL
ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKALLOY
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO

SPEZIALITÄTEN

WWW.CKPL.EU

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE



Prospekt Nr. **267.D-ed.C**

© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium

T +32 56 629 100 · **F** +32 56 629 101 · **E** info@ckpl.eu

