

# 03.

## PROFIL ATTACHMENTS

PRECI-HORIX®  
DEUTSCH



CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE

# PRECI-HORIX

## EINFACH UND VORTEILHAFT

Das PRECI-HORIX-Stegreitersystem, entwickelt von Helmut Hader, ist einfach zu verarbeiten und von dauerhafter Präzision. Es ist die wohl weltweit am häufigsten verwendete Stegverankerung. Zahntechniker schätzen PRECI-HORIX schon seit über 40 Jahren aufgrund der sicheren Retention der Kunststoffreiter, der unkomplizierten Nachsorge und des Tragekomforts für den Patienten.





- ✓ Schnell und einfach ersetzbarer Reiter in drei verschiedenen Retentionswerten
- ✓ Freie Legierungswahl
- ✓ Hervorragend geeignet zur Verwendung auf Implantaten
- ✓ Direkte Abstützung mit Rotation
- ✓ Das hörbare Einrasten des Reiters signalisiert dem Patienten die sichere Verankerung



# PRECI-HORIX-GEHÄUSE

## EINFACHES ANBRINGEN DER REITER

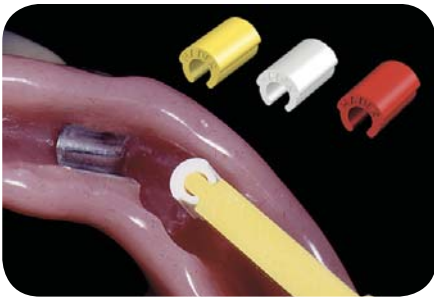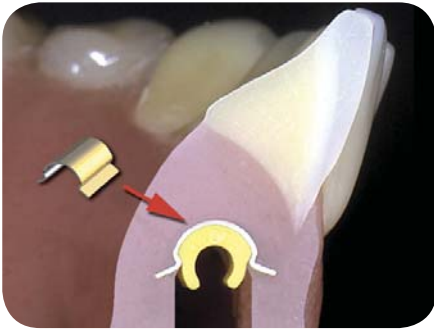

Empfohlene Verarbeitung: Polymerisieren Sie das Metallgehäuse für den passgenauen Sitz des Reiters in den Kunststoff ein. Setzen Sie dann den PRECI-HORIX-Kunststoffreiter in einem der drei Retentionswerte in das Metallgehäuse.

Weiß: reduzierte Retention




Gelb: normale Retention


Rot: starke Retention



Das Profil von 1,8 mm ist auch mit den PRECI-CLIP-Reitern kompatibel.

# EINFACHE VERARBEITUNG

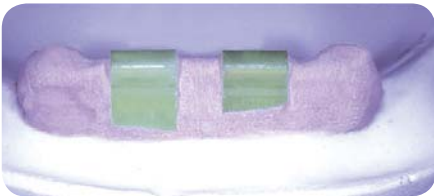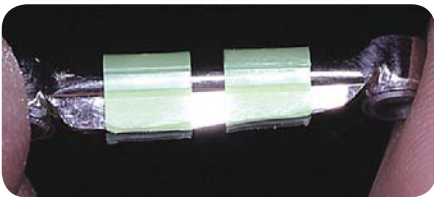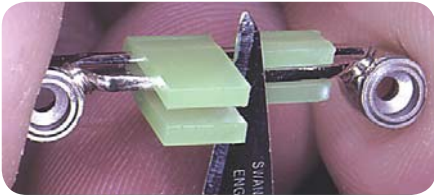

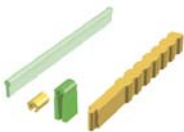


### PRECI-HORIX STANDARD

# 1701

SATZ

2 Kunststoffstege  
6 gelbe Reiter  
6 Verarbeitungsreiter  
1 Eindrückstift

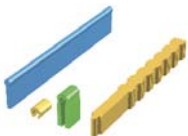

### PRECI-HORIX PLASTICWAX

# 1731

SATZ

2 PLASTICWAX-Stege  
6 gelbe Reiter  
6 Verarbeitungsreiter  
1 Eindrückstift



### PRECI-HORIX COMBI

# 1741

SATZ

1 Kunststoffsteg  
2 gelbe Reiter  
2 Verarbeitungsreiter  
2 INOX-Gehäuse  
1 Eindrückstift



### PRECI-HORIX-REITER

Normale Retention:

# 1802 **gelb** 6 St.  
# 1802B **gelb** 50 St.

Reduzierte Retention:

# 1805 **weiß** 6 St.  
# 1805B **weiß** 50 St.

Starke Retention:

# 1806 **rot** 6 St.  
# 1806B **rot** 50 St.

Kombinationspackung:

# 1807 2 g + 2 r + 2 w  
# 1807B 25 g + 15 r + 10 w



### PRECI-HORIX-METALLGEHÄUSE

Ultradünnes INOX-Gehäuse mit goldgelber Titan-Nitrat-Schicht für den passgenauen Sitz der Reiter in der Prothese.


# 1706 6 St.  
# 1706B 50 St.



### PRECI-HORIX-KUNSTSTOFFPROFIL

Profilsteg aus restlos verbrennbarem Kunststoff. Gießen Sie in einer harten Legierung.

Länge: 50 mm - Höhe: 4 mm -  $\varnothing$  1,8 mm  
# 1704 6 St.  
# 1704B 50 St.

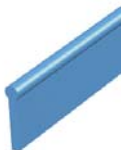

### PRECI-HORIX PLASTICWAX-PROFIL

Ideal zur Verarbeitung mit schnell aufheizbaren Einbettmassen.

Gießen Sie in einer harten Legierung.  
Länge: 50 mm - Höhe: 8,25 mm -  $\varnothing$  1,8 mm  
# 1734 6 St.  
# 1734B 50 St.

CEKA AXIAL  
PRECI-CLIX AXIAL  
PRECI-CLIX RADIKULÄR  
PRECI-BALL

**01.**  
AXIALE  
ATTACHMENTS

CEKA EXTRAKORONAL  
CEKA ID  
PRECI-VERTIX  
PRECI-VERTIX AT  
PRECI-CLIX EC  
PRECI-SAGIX  
PRECI-52  
PRECI-TUBIX/MORTIX

**02.**  
EXTRAKORONALE  
ATTACHMENTS

PRECI-BAR  
**PRECI-HORIX**  
PRECI-CLIP

**03.**  
PROFIL  
ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE  
PRECI-POST  
CEKA SOL  
CEKALLOY  
CEKA SITE  
CEKA BOND  
3C-BOND  
PERMA-RET  
PRECI-SEP  
PLASTICWAX  
EXPANDO

SPEZIALITÄTEN

[WWW.CKPL.EU](http://WWW.CKPL.EU)

CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE



Prospekt Nr. **273.D-ed.B**

© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

**ALPHADENT NV** • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 100 - F +32 56 629 101 - E info@ckpl.eu

