


CEKA ATTACHMENTS PRECI-LINE

PRECI-VERTIX®



ПРЕЦІ-ВЕРТИКС

- Зручні в використанні та обслуговуванні
- Естетичні: можуть використовуватися у фронтальних ділянках
- Легкі у виробництві
- Можливість застосування з будь-якими стоматологічними сплавами
- Недорогі
- Комфортні для пацієнта
- Понад 30 років клінічного використання

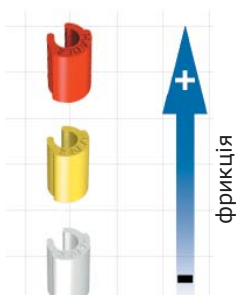


ПРЕЦІ-ВЕРТИКС забезпечують довготривале ретенційне з'єднання, латеральну стабільність і мінімальне зношення матриці.

Три типи еластичних матриць дають можливість регулювати силу утримання протезу.




В паралелометрі приєднайте матрицю до воскової композиції. При необхідності матрицю можна вкоротити до 3 мм висоти. Рекомендоване фрезування опірно-стабілізаційних площин та інтерлоку. Після литва фрезуйте і поліруйте в паралелометрі. Одягніть жовту матрицю та підготуйте для дублювання, блокуючи всі піднутрення.

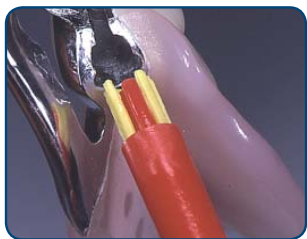

Після дублювання виготовити вогнетривку модель. Покрийте воском верх замка та перехід замка в коронку. Запакуйте і проведіть литво бюгеля. Проведіть попередню обробку. Не поліруйте внутрішню поверхню місця для матриці, цю поверхню очистити від залишків формувальної маси та окислів сплаву за допомогою піскоструменевої обробки. Вкоротіть верхній торець матриці на 0,2 мм для уникнення можливості виникнення бокового навантаження на опірний зуб. Вставте матрицю за допомогою тримача. У всіх випадках використовуйте відповідний інструмент, одягаючи і знімаючи матрицю.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ ПРЕЦІ-ВЕРТИКС СТАНДАРТНОЇ ОБОЙМИ ДО МАТРИЦІ РЕКОМЕНДОВАНО

Беззольна пластикова обойма дозволяє отримати чітку контр-форму під матрицю і забезпечує відмінну естетику.

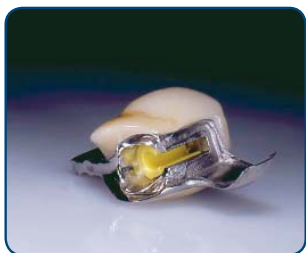

Використовуйте обойму з білою матрицею (# 1805). Сформуйте обойму по висоті і до сітки бюгельного протезу.

Обойма виконана зі спеціальним подовженням. Надайте обоймі форми відповідно до обраного гарнітуру.

Витягніть білу матрицю з обойми відповідним інструментом. Запакуйте і проведіть литво. З'єднайте подовження обойми з роботою за допомогою акрилу або композиту.

1801



ПРЕЦІ-ВЕРТИКС СТАНДАРТ:

6 патриць з приєднаним паралелотримачем
6 жовтих матриць
1 тримач для матриць

1811



ПРЕЦІ-ВЕРТИКС ПІ:

6 патриць (забезпечують акуратну межу і тонкий чіткий контур)
6 жовтих матриць
1 тримач для матриць
1 паралелотримач для патриць


1812



ПРЕЦІ-ВЕРТИКС ПІ КОМБІ:

2 патриці (забезпечують акуратну межу і тонкий чіткий контур)
2+2+2 матриці
2 обойми для литва
1 тримач для матриць
1 паралелотримач для патриць

ЗМІННІ ЧАСТИНИ:

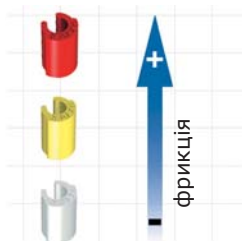

Сильна фрикція:

1806 6 червоних матриць

1806B 50 червоних матриць

Середня фрикція:

1802 6 жовтих матриць

1802B 50 жовтих матриць

Низька фрикція:

1805 6 білих матриць

1805B 50 білих матриць

ПРЕЦІ-ВЕРТИКС ОБОЙМА:



1808 6 обойм для литва

1808B 50 обойм для литва

WWW.CEKA-PRECILINE.COM

SWISS MADE



CEKA REVAX

CEKA SOL

PRECI-HORIX

PRECI-VERTIX

PRECI-VERTIX AT

PRECI-BAR

PRECI-BALL

PRECI-CLIP

PRECI-SAGIX

PRECI-CLIX AXIAL

PRECI-CLIX EXTRACORONAL

PRECI-CLIX RADICULAR

PRECI-CLIX RADICULAR RC

PRECI-TUBIX/MORTIX

PRECI-POST

PRECI-PROFILE

PERMA-RET

3C-BOND

EXPANDO

CEKA-MAX

PRECI-VERTIX®

Проспект № 262.0-ed.B
Copyright© ALPHADENT NV 2/2008
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV
Textielstraat 24
8790 Waregem, Belgium
tel +32 56 629 100
fax +32 56 629 101
e-mail: info@ceka-preciline.com