

UNTERFÜTTERN EINER PROTHESE MIT PRECI-HORIX

1. Machen Sie eine Abformung mit den Reitern in der Prothese.
2. Entfernen Sie die Reiter aus der Prothese und füllen Sie den Bereich des Steges und der Reiter mit Gips und Trennmittel auf.
3. Fertigen Sie ein Hartgipsmodell an. Entfernen Sie das Abformmaterial. Die Verwendung eines Unterfütterungsgeräts bzw. einer Küvette ist empfehlenswert.
4. Unterfüttern Sie in gewohnter Weise.
5. Versehen Sie die Prothese nach Fertigstellung mit neuen Reitern.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.