

IDENTIFIZIEREN VON MATRIZEN

Im Laufe der Jahre wurden im **CEKA-Attachment-System** zahlreiche Attachments auf den Markt gebracht. Um eine gute Patientenbetreuung zu garantieren, sind alle seit **1959** hergestellten Patrizentypen noch immer lieferbar. Die Matrize für den jeweiligen Druckknopf muss jedoch identifiziert werden können.

Mit den Hilfsteilen **RE H 14 + RE 0031**, **H 14 + 694 C** und **H 30** können die Matrizen identifiziert werden.

PATRIZE IN DER STIFTWURZELKAPPE

Es gibt Unterschiede zwischen **2 Matrizenausführungen**:

*	CEKA Classic Matrize (# 691 A):
	Außendurchmesser Matrize: 4,00 mm
	Innendurchmesser Matrize: 1,85 mm
	Matrizenhöhe: 2,40 mm

HINWEIS

Komplettieren Sie mit dem Laborschlüssel **RE H 5** das Modellhilfsteil **H 3** mit dem Druckknopf **694 C** und drücken Sie diese Einheit probeweise in die Matrize.

*	REVAX Standard M2 Matrize (# RA 0091):
	Außendurchmesser Matrize: 3,40 mm
	Innendurchmesser Matrize: 1,85 mm
	Matrizenhöhe: 2,20 mm

HINWEIS

Komplettieren Sie mit dem Laborschlüssel **RE H 5** das Modellhilfsteil **RE H 14** mit dem Druckknopf **RE 0031** und drücken Sie diese Einheit probeweise in die Matrize.

MATRIZE IN DER STIFTWURZELKAPPE

Es gibt Unterschiede zwischen **2 Matrizenausführungen**:

*	REVAX Macro M3 Matrize (# OL 0800 TI):
	Außendurchmesser Matrize: 4,40 mm
	Innendurchmesser Matrize: 1,85 mm

HINWEIS

Komplettieren Sie mit dem Laborschlüssel **RE H 5** das Modellhilfsteil **H 14** mit dem Druckknopf **694 C** und drücken Sie diese Einheit probeweise in die Matrize.

- * **REVAX Standard M2 Matrize (# RE 0700 TI):**
 Außendurchmesser Matrize: 3,40 mm
 Innendurchmesser Matrize: 1,85 mm

TIP

Komplettieren Sie mit dem Laborschlüssel **RE H 5** das Modellhilfsteil **RE H 14** mit dem Druckknopf **RE 0031** und drücken Sie diese Einheit probeweise in die Matrize.

EXTRAKORONALE MATRIZEN

- * **CEKA Classic und REVAX Macro M3 Matrize**
 (# OL 694 D bzw. OL 0200):
 Außendurchmesser Matrize: 4,10 mm
 Innendurchmesser Matrize: 1,85 mm
 Matrizenhöhe: 1,70 mm

HINWEIS

Komplettieren Sie mit dem Laborschlüssel **RE H 5** das axiale Modellhilfsteil **H 14** mit dem Druckknopf **694 C** und drücken Sie diese Einheit probeweise in die Matrize.

- **REVAX Standard M2 Matrize (# RE 0100):** Außendurchmesser Matrize: 3,30 mm
 Innendurchmesser Matrize: 1,85 mm
 Matrizenhöhe: 2,50 mm

HINWEIS

Komplettieren Sie mit dem Laborschlüssel **RE H 5** das axiale Modellhilfsteil **RE H 14** mit dem Druckknopf **RE 0031** und drücken Sie diese Einheit probeweise in die Matrize.

- * **CEKA INTRAX:** Kombination einer **extrakoronalen** Matrize mit einem **intrakoronalem Geschiebe:**
 Außendurchmesser Matrize: 4,00 mm
 Matrizenhöhe: 1,70 mm
 Innendurchmesser Geschiebe: 1,80 mm

- * **CEKA MINITRAX:** Kombination einer **extrakoronalen** Matrize mit einem **intrakoronalem Geschiebe:**
 Außendurchmesser Matrize: 2,80 mm
 Matrizenhöhe: 1,70 mm
 Innendurchmesser Geschiebe: 1,80-2,20 mm

- * **CEKA ID M2 Matrize (# 703 D):** Kombination einer **extrakoronalen** Matrize mit einem **intrakoronalem Geschiebe:**
 Außendurchmesser Matrize: 3,20 mm
 Matrizenhöhe: 1,75 mm
 Innendurchmesser Geschiebe: 2,00 mm

- * **CEKA ID M3 Matrize (# RE 0053 IR):** Kombination einer **extrakoronalen** Matrize mit einem **intrakoronalen Geschiebe:**

Außendurchmesser Matrize:	4,80 mm
Matrizenhöhe:	1,90 mm
Innendurchmesser Geschiebe:	2,00 mm

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.