

ERNEUERN EINER PROTHESE MIT PRECI-CLIX

IN DER ZAHNARZTPRAXIS

1. Blocken Sie den untersichgehenden Bereich der Matrize mit Weichwachs aus.
2. Machen Sie mit einem individuellen Abdrucklöffel eine Abformung des gesamten Zahnbogens.

IM LABOR

1. Setzen Sie den Modellanalog **1201 D** bzw. die Kombination **RE H 14 + 1206 C** in die Abformung.
2. Fertigen Sie ein Arbeitsmodell mit eingesetzten Modellanalogen an.
3. Fertigen Sie eine neue Sekundärkonstruktion an.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.