

ERSETZEN EINER PRECI-SAGIX-MATRIZE

Sämtliche PRECI-SAGIX-Einführungssätze enthalten Matrizen in 3 verschiedenen Retentionswerten.

Entspricht die Retention der Matrize nicht den Anforderungen, so kann sie durch eine weiße Matrize **1312** (Mini \varnothing 1,7 mm) bzw. **1362** (Standard \varnothing 2,2 mm) mit reduzierter Retention, eine gelbe Matrize **1311** (Mini \varnothing 1,7 mm) bzw. **1361** (Standard \varnothing 2,2 mm) mit normaler Retention oder durch eine rote Matrize **1313** (Mini \varnothing 1,7 mm) bzw. **1363** (Standard \varnothing 2,2 mm) mit stärkerer Retention ersetzt werden.

1. Verwenden Sie zum Entfernen der Matrize ein spitzes Instrument.
2. Dampfstrahlen Sie die Aussparung im Modellguss.
3. Drücken Sie die Matrize mit dem gewünschten Retentionswert mit dem universellen Eindruckstift **1323** (für \varnothing 1,7 mm und 2,2 mm) an ihre Position.
4. Kontrollieren Sie den richtigen Sitz der Matrize und die Retention.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.